

Instructie




Stap 1

Neem met schone handen de wattenstaafjes uit de steriele verpakking. Probeer de wattentip niet met de handen aan te raken. Houdt alleen de houtensteeltjes vast.



Stap 2

Wrijf met de 1^e wattentip circa 10 keer stevig aan de linkerbinnenzijde van de wang. Doe dit vervolgens ook met de 2^e wattentip, maar nu aan de rechterbinnenzijde van de wang. Herhaal deze handeling(en) vervolgens bij de 2^e testpersoon.

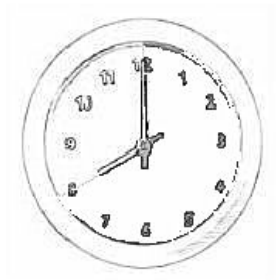

Stap 3

Laat alle wattentips vervolgens enkele minuten drogen in een natuurlijke omgeving. Probeer de wattentips niet met de handen aan te raken (dit om vervuiling en de kans op een negatieve uitslag uit te sluiten).



Stap 4

Nadat de wattentips enkele minuten gedroogd zijn doet u ze in een schone enveloppe. Let wel op dat u de wattenstaafjes niet verwisseld. In de enveloppe waar u de wattenstaafjes van de vader heeft gedaan schrijft u aan de voorzijde “Vader” en de enveloppe van het kind schrijft u “Kind”



Stap 5

Nadat u de enveloppen hebt dicht gepakt met plakband doet u ze vervolgens in een grotere enveloppe. Plak vervolgens de enveloppe dicht en verstuur hem naar het geadresseerde adres.

!! Vergeet niet uw e-mailadres en Naam te vermelden

Incertezza

afd. Peace of Mind

Iependaal 41

3181 AH ROZENBURG